



TELINKO


Vous allez débiter votre suivi à distance grâce à l'application (téléchargée sur les stores Apple ou Android) et au kit photo distribué par votre praticien.

Voici les conseils essentiels pour vous guider au mieux

À chaque prise de photo ou vidéo, vous pourrez accéder à la page des tutoriels.

-1-

Pensez à retenir les détails en visualisant la vidéo d'explication.

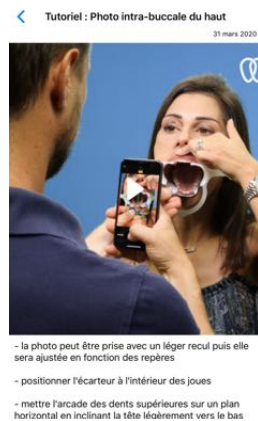

-2-


Lire attentivement les explications sous la vidéo : il y a d'autres astuces !





-3-

Lors de la prise de photo, divers repères vous aideront à vous positionner.

Exemples

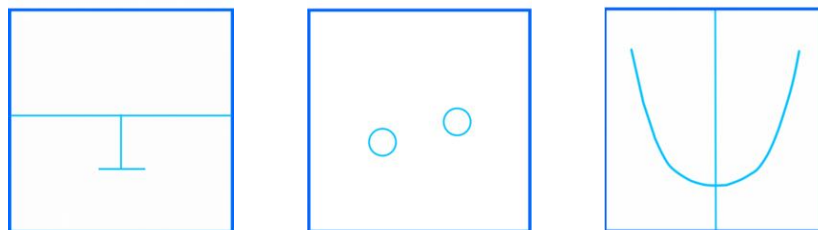

Les lignes horizontales ou verticales vous permettront de maintenir votre appareil dans l'axe adéquat pour une prise de vue précise.

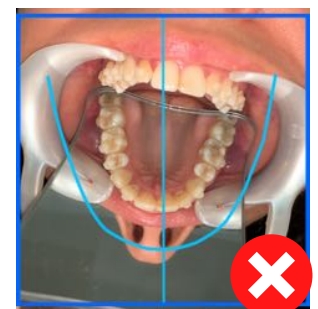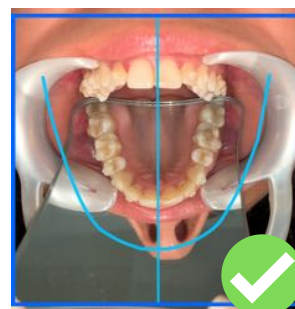


TELINKO

Parents ou amis,

Plongez-vous dans la peau d'un photographe !
Vous aurez pour mission la délicate tâche de vous surpasser.

-1-

Positionnez-vous et rapprochez-vous le plus possible des repères, en fonction de nos indications.

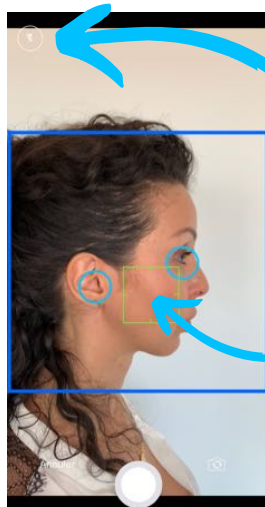

-2-


Mais surtout, **TRÈS IMPORTANT**, avant de prendre cette photo, vous devez :

- vérifier que le flash est bien enclenché,

- avant de prendre la photo, faire la mise au point, en tapant du doigt sur l'écran.



Le miroir est en verre, donc attention aux chocs !

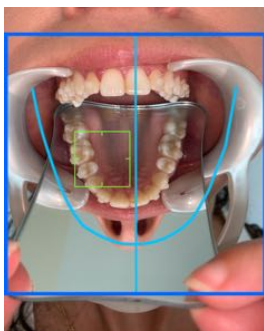

Vous êtes trop éloigné des repères ?
Pas de panique, une fois la photo prise, vous pourrez zoomer pour ajuster les repères.



FÉLICITATION !

Votre formation d'expert est terminée.
Votre praticien vous remerciera pour votre collaboration !
C'est certain...



N'hésitez pas à nous faire parvenir vos remarques et propositions d'amélioration en nous contactant sur "contentpascontent@telinko.com"